



## 歩行補助杖の種類

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」

多脚杖




サイドウォーカー

ロフトランド杖



C字型

T字型

オフセットL型

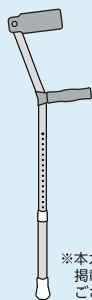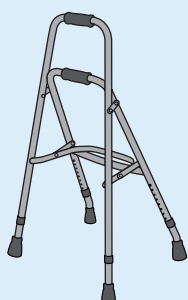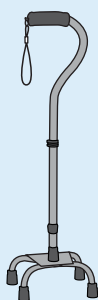

※本カタログには  
掲載は  
ございません。

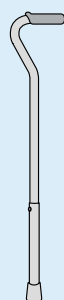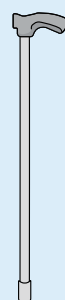

介護保険貸与対象

介護保険貸与対象外

## 杖の役割・使い方



参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」

### 1 免荷

杖に体重を預けることで、足にかかる負担を減らすことができます。

### 2 バランスの補助

両足+杖を使用することで、体を支える面積が増え、バランスがとりやすくなります。

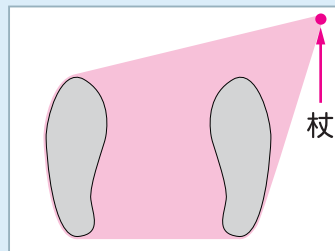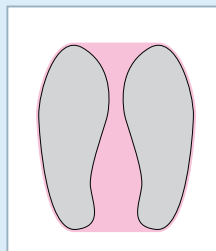

支持面積

歩行が不安定になると「イチ」「ニ」「イチ」「ニ」という二拍子のリズムで歩くことが難しくなります。そこで杖を使って、「イチ」「ニ」「サン」の三拍子のリズムでゆっくりと歩くことで、安定した歩行をサポートします。


### 3 歩行のリズム

二拍子のリズム

イチ♪ 患側の足  
ニ♪ 健側の足


三拍子のリズム

イチ♪ 杖  
ニ♪ 患側の足  
サン♪ 健側の足

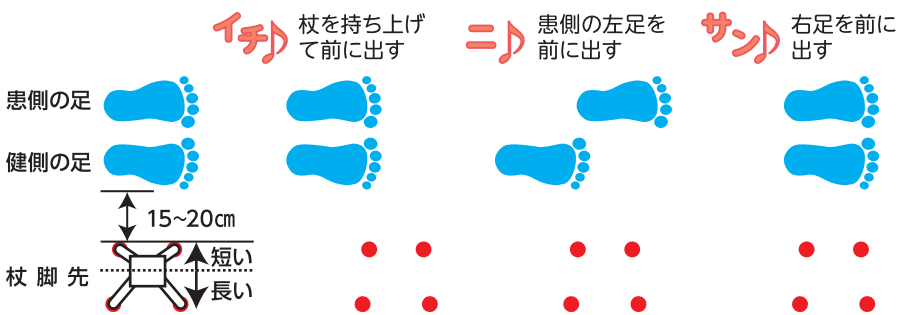

力を抜いて自然に立ちます。杖をしっかり握り、地面に対して真下に押し使します。杖を使用することで足を出すリズムがイチ♪(杖)、ニ♪、サン♪の三拍子になります。

グリップの握り方

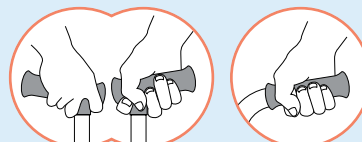

### カーボン四点可動式スモールタイプ

非課税 重さ 440g

島製作所



カーボン柄グレー


支柱が前後に可動し路面に接地しやすい為、屋外や坂道などでも使用可能です。左右両用。

商品名	商品番号	商品コード
74MC-3(カーボン柄グレー)	24-5510-0	00576-000033
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円 (3割)	円

### オールカーボンオッドケイン四点式

非課税 重さ 400g

島製作所

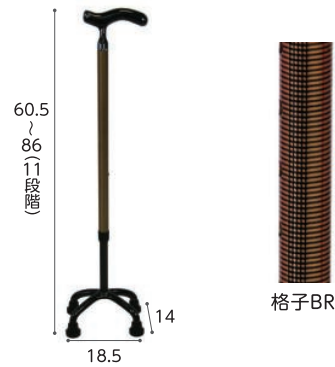

格子BR

グリップがT字の為、一本杖を使用してきた方も、違和感が少なくお使い頂けます。60.5cmまでグリップ位置が下がり、身長が低い方にもおススメです。左右両用。

商品名	商品番号	商品コード
70C-C1(格子BR)	24-5467-0	00576-000031
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円 (3割)	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### テトラ・ケイン

非課税 重さ S:440g

重さ M:460g

田辺プレス



右・左の切替ができて、にぎりやすいオリジナルグリップ。左右両用

商品名	商品番号	商品コード
テトラ・ケイン(青墨)S	24-5449-0	01105-000001
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円 (3割)	円

商品名	商品番号	商品コード
テトラ・ケイン(青墨)M	24-5450-0	01105-000028
材質: (杖) マグネシウム合金 (石突キャップ・グリップ) エラストマー		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円 (3割)	円

### 四点杖 CMS-40S

非課税 重さ 980g

松永製作所



身長の高い方にも使いやすい長めのサイズ。左右両用。

商品名	商品番号	商品コード
CMS-40S	24-5303-0	00066-000222
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円 (3割)	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### 四脚杖 TY142S

非課税 重さ 800g

日進医療器



小柄な方も使いやすい軽量、コンパクトタイプ。左右両用。

商品名	商品番号	商品コード
TY142S	24-0201-0	00175-000270
材質: (杖) マグネシウム合金 (石突キャップ・グリップ) イラストマー		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円 (3割)	円

### サイドウォーカー MRB-02031


非課税 重さ 1750g

ミキ



サイドウォーカーの使い方  
(左側にまひのある場合)

- ・ご使用前にご利用者に合わせて脚部の長さを調節します。
- ・サイドウォーカーは右手で持ちます。
- ①サイドウォーカーを前に出す
- ②左足を出す
- ③右足を出す
- この動きを繰り返して進みます。

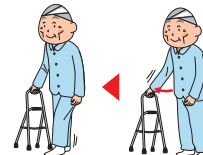

立ち上がりの支持や歩行バランスを保ち、体をしっかりサポート。歩行訓練にも。

商品名	商品番号	商品コード
MRB-02031	24-5304-0	00122-000118
折りたたみ時: 全幅41.5~44×奥行7×全高78~90.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円 (3割)	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報